


JE VEUX

Connecter mon bracelet V.ALRT

Comme le bracelet V.ALRT est fourni avec le « Plan bénéficiaire », pour l'activer, il faut absolument que vous ayez un statut de bénéficiaire et que vous soyez suivi(e) par au moins une personne avec un plan « Expérience » ou « Contrôle ».

Étape 1: Ouvrir l'écran « Appareils »

Dans l'écran d'édition, ouvrir le tiroir du menu  et, choisir « Appareils »

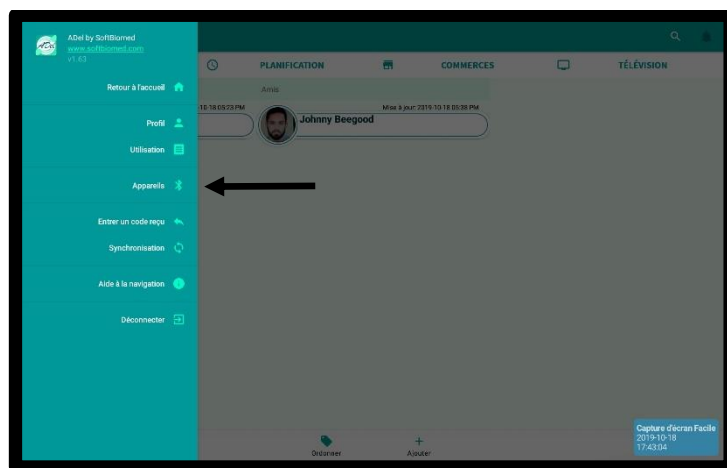


Figure 1 : Écran du menu d'édition

Étape 2: Sélectionner son bracelet

Normalement, un bouton V.ALRT a été couplé à votre tablette ADel et vous devriez le voir dans l'écran « Appareils ».

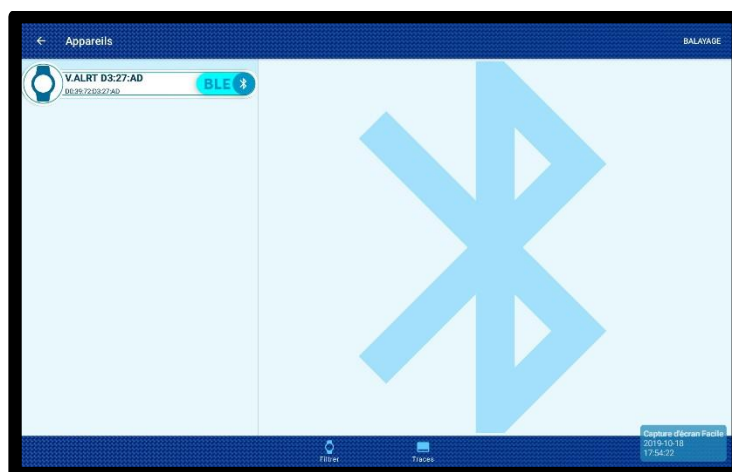



Figure 2 : Écran de connexion d'appareils Bluetooth

JE VEUX

Étape 3: Activer la connexion de son bracelet

Appuyez d'abord sur l'icône de la montre et vous devriez voir apparaître l'écran suivant dans lequel il y a une icône de batterie  avec un « ? »:

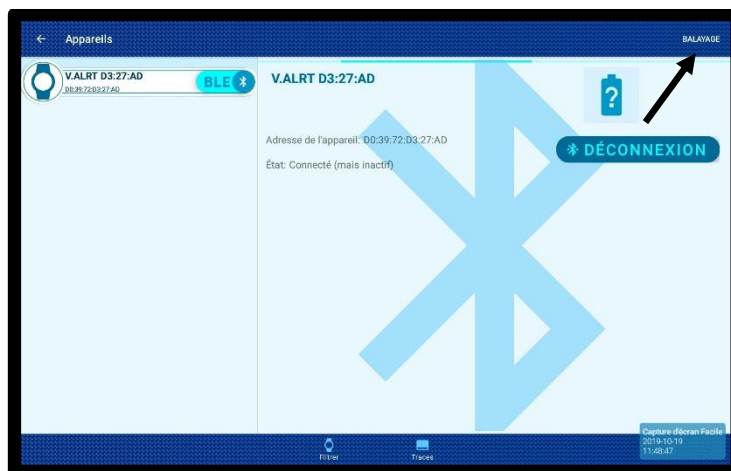


Figure 3 : Écran de balayage des objets Bluetooth

Appuyez ensuite « DÉCONNEXION » puis sur « CONNEXION ». Le bracelet devrait se connecter automatiquement. Dans ce cas, le « ? » disparaîtra et vous verrez apparaître niveau de charge de la batterie.

Si la procédure ne fonctionnait pas, appuyez sur « BALAYAGE » (Flèche) en même temps que sur le bouton du bracelet et maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce la lumière du bouton passe au vert. Relâchez le bouton et le « ? » disparaîtra de l'icône de la batterie et que vous verrez son niveau de charge:

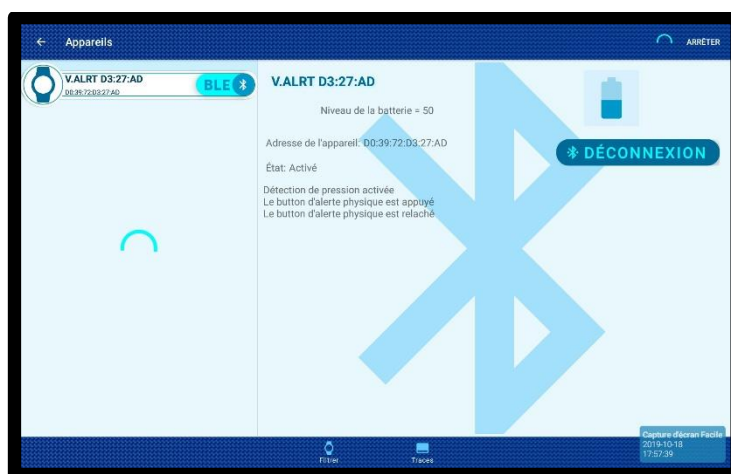



Figure 4 : Écran indiquant que le bouton est connecté

Si le balayage s'arrête et que votre bouton n'est pas connecté, **répétez l'Étape 3.**

Étape 4: Revenir à l'écran d'accueil

Pour revenir à l'écran d'accueil, appuyez sur la flèche en haut, à gauche de « Appareils » puis, à partir du menu , sur « Retour à l'accueil ».

JE VEUX

Étape 5: Tester le bouton

Testez le bouton en appuyant une fois dessus. Vous pouvez réaliser cette étape à n'importe quel niveau, par exemple à l'écran d'accueil, vous verrez apparaître ce message (Figure 5) :

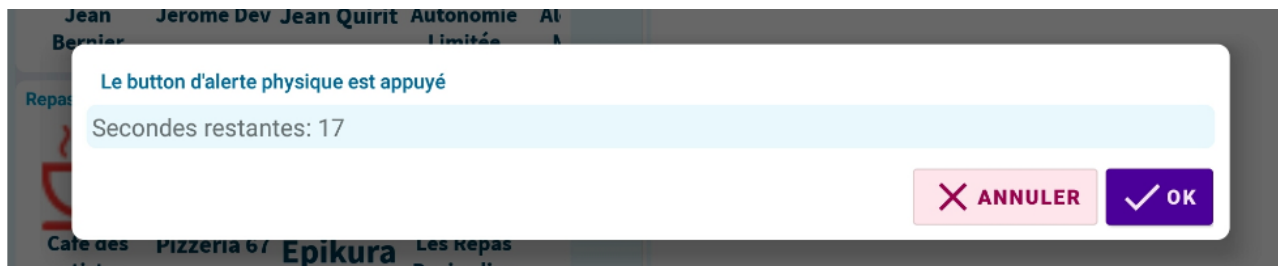


Figure 5: Message de confirmation de l'Alerte


Vous aurez 20 secondes pour l'annuler autrement ADel tombera en mode « **Alerte** » (Figure 6):



Figure 6: Indication d'alerte activée

Au même instant, votre proche aidant et les personnes autorisées recevront un texto les avertissant que vous avez activé votre bouton d'alerte. La première personne qui vous appellera alors en visiophonie, entrera en conversation avec vous automatiquement sans que vous ayez à répondre.

Étape 6: Désactiver l'alerte

Vous pouvez désactiver l'alerte simplement, en appuyant pendant environ 3 secondes sur le triangle  au haut de l'écran.

Champion! Votre bracelet est activé.