



FICHA TECNICA

RESPIRADOR N95



El respirador N95 filtra el menos el 95% de las partículas del aire con menor esfuerzo al respirar y mayor eficiencia de filtración y posee las mismas especificaciones y propiedades de la NIOSH

Características.

Protección respiratoria contra partículas sólidas y líquidas no volátiles

Telas no tejidas.

El respirador cuenta con telas hipoalergénicas internas y externas telas preformadas que le dan firmeza y un filtro electrostático para garantizar la protección.

Sellado ultrasonido.

El respirador N95 fusiona las telas por medio de sellado ultrasonido garantizando seguridad y protección

El respirador N95 puede ser evaluado y puesto a pruebas por el grupo SGS para la verificación y cumplimiento de la calidad en los materiales y certificar su uso y exportación.



Filtro 4 capas.

filtro no tejido cargado electrostáticamente para atrapar y retener partículas hasta de 0,073 micras antes de ser inhaladas por quien lo usa asegurando una eficiente protección.

Nariguera.

Ubicada en la parte superior del respirador proporcionando un perfecto ajuste y comodidad. se amolda perfectamente a cualquier tabique.

Bandas de ajuste.

Bandas elásticas hipoalergénicas con los estándares de elongación que garantizan total ajuste y comodidad

SGS



Este producto no requiere certificación INVIMA

BENEFICIOS TAPABOCAS REUTILIZABLE

- Sin fibra de vidrio
- Tela antilíquido
- Adaptable a la nariz
- Hipor alergénico
- Liviano y lavable
- Alta respirabilidad

CÓMO PONERSE EL TAPABOCAS

Para poder garantizar una debida protección con el uso del tapabocas, es importante seguir algunas recomendaciones básicas:

- Lavarse las manos antes de usarlos.
- Revisar los desperfectos.
- Asegurarse de que la parte superior del tapabocas está del lado correcto.
- Al colocarse en la cara, ajustar con lazos o bandas.
- Toca con los dedos la nariz, para asegurar la posición correcta.
- Ajustarlo con el borde inferior a la barbilla.

BENEFICIOS TELA ANTIFLUIDO



stain GUARD®

TECNOLOGÍA ANTIFLUIDOS & ANTIMANCHAS

Innovadora tecnología que forma una barrera protectora invisible alrededor de las fibras de los tejidos evitando la absorción de líquidos y fluidos al tiempo que proporciona una protección contra manchas, salpicaduras y el polvo facilitando el cuidado de las prendas.

Norma: AATCC 22: Water Repellency



Repelencia al agua y fluidos:
Los líquidos resbalan sin ser absorbidos.



Protección contra manchas
y salpicaduras a base de
agua o aceite.



Minimiza el riesgo de
acumular agentes
contaminantes.



Fácil cuidado, resistente al
lavado y las arrugas.



Mantiene las características
y transpirabilidad de las
telas



Dermatológicamente
seguro. No tóxico. Cumple
Oeko-Tex Standar 100.



Se garantizan 20 lavadas
sin que la tela pierda sus
propiedades iniciales.



Producto ecológico, libre de
químicos PFOA nocivos
para el medio ambiente y la
salud.

BENEFICIOS TAPABOCAS REUTILIZABLE

- Sin fibra de vidrio
- Tela antilíquido
- Adaptable a la nariz
- Hipor alergénico
- Liviano y lavable
- Alta respirabilidad

CÓMO PONERSE EL TAPABOCAS

Para poder garantizar una debida protección con el uso del tapabocas, es importante seguir algunas recomendaciones básicas:

- Lavarse las manos antes de usarlos.
- Revisar los desperfectos.
- Asegurarse de que la parte superior del tapabocas está del lado correcto.
- Al colocarse en la cara, ajustar con lazos o bandas.
- Toca con los dedos la nariz, para asegurar la posición correcta.
- Ajustarlo con el borde inferior a la barbilla.