

RESPONSE

La RESPUESTA en tus manos

PRUEBA DE EMBARAZO HCG



La Gonadotropina Coriónica humana (hCG) es una glucoproteína secretada por la placenta poco tiempo después del embarazo, esta puede ser detectada en la orina o suero de la mujer embarazada.

Response Prueba de Embarazo hCG en orina, es un inmunoensayo cualitativo para la pronta detección del embarazo.

El test de embarazo utiliza un anticuerpo monoclonal específico de la hCG en un inmunoensayo cromatográfico de flujo lateral de un paso para detectar con exactitud la hCG a un nivel cercano o mayor de 25 mUI/ml.

● Almacenamiento

Almacenar a temperatura ambiente, de 15-30° C (59-86° F). No utilizar los dispositivos si fueron congelados y/o expuestos a temperaturas superiores a 30° C.

● Pronta detección

La sensibilidad de nuestro producto es alta, lo que significa que el embarazo puede ser detectado alrededor de los 7 días antes del siguiente período.

● Alta precisión

Debido al diseño especial de nuestro empaque metálico, Response mantiene una alta calidad con un rango de precisión cerca del 99.9%.

● Mínimo de muestra, necesitado para realizar la prueba

Solamente se necesita 0.2ml de orina.



RESPONSE PRUEBA DE EMBARAZO HCG LÁPIZ



Positivo



Negativo



Inválido

LEYENDO LOS RESULTADOS




RESPONSE PRUEBA DE EMBARAZO HCG CASSETTE

LEYENDO LOS RESULTADOS


Positivo

Línea de control Línea de prueba Pozo de muestra

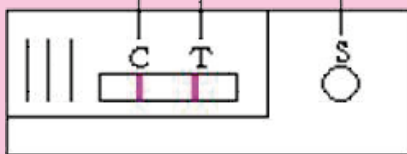


Negativo

Línea de control Línea de prueba Pozo de muestra

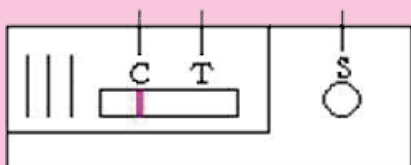

Inválido

Línea de control Línea de prueba Pozo de muestra

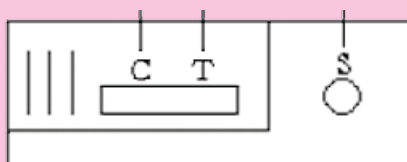

Distribuidor Autorizado para
Centro América



Km 16.5 Carretera Ticuantepe, Pozo Enacal "Las Conchitas" 150mts al Este

Tel.: (505) 2279-6363 / 2279-9146

e-mail: dismedicalsa@gmail.com

www.dismedicalsa.com

Registro Sanitario Nicaragua-Honduras:

RESPONSE Cassette II03-231112-399

RESPONSE Lapiz II03-231112-400